

Materac HF6002

Specyfikacja:

Max. waga użytkownika: 145 kg
Wymiary materaca: 200 x 90 cm x 11.5 cm
Materiał: PVC (polichlorek winylu) 0.45mm
Kolor: beżowy
Waga materaca: 5,5-6,5kg
Ilość komór materaca: :18
Gwarancja: 18 miesięcy

Pompa HF62012

Specyfikacja:

Wyjście powietrza: 5-7L/min
Zakres ciśnienia: 50-120mmHg
Elektryczne zasilanie: 220V/50Hz
Wydajność: 5-7 L/ Min.
Ochrona przed porażeniem elektrycznym klasy II
Bezpieczniki: 1A
Pobór prądu: 7W
Wymiary: 23.5 (dł.) x 12 (wys.) x 9.5 (szer.) cm
Gwarancja: 18 miesięcy

Importer:

Reha Fund Sp. z o. o.
ul. Staniewicka 14,
03-310 Warszawa
tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl



FOSHAN HONGFENG CO.,LTD

Add: No.4-2 Leqiang Road, Leping, Sanshui, Foshan District, Guangdong Province, China



TECHNOLOGY OF KOREA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Medyczny materac pneumatyczny zmiennociśnieniowy z pompą

WYRÓB MEDYCZNY

Wersja: 1.0/10/2023



MedNet EC-REP GmbH

Borkstrasse 10 48163 Muenster, Germany

Sposób działania

- System zmiennociśnieniowy o odpowiedniej częstotliwości pozwala uniknąć długotrwałego ucisku naczyń krwionośnych, który może spowodować niedotlenienie tkanek.
- System zmiany ciśnienia pozwala na dopasowanie materaca do pacjenta i jego pozycji.

Wytyczne dotyczące użytkowania

Tradycyjnie zaakceptowaną metodą profilaktyki przeciwoleżynowej jest regularne obracanie pacjenta i regularna obserwacja obszarów ryzyka.

Użycie materaca zmiennociśnieniowego jest uzupełnieniem tego zabiegu. Jednocześnie, w razie potrzeby, obracanie i obserwację pacjenta nadal trzeba traktować jako część opieki nad pacjentem.

Przeznaczenie:

- dla pacjentów, którzy prawdopodobnie będą spędzać w łóżku ponad 15 godzin dziennie
- dla pacjentów ze średnim lub wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn

Instalacja i użycie

1. Rozwiń materac.
2. Umieść materac na łóżku.
3. Ułóż go odpowiednio na łóżku za pomocą wyłogów.
4. Umieść pompę na ramie łóżka za pomocą haków od strony nóg pacjenta.
5. Połącz materac z pompą za pomocą rurek dopasowując odpowiednie wyloty.
6. Połącz pompę z kablem zasilającym dopasowując odpowiednie wyloty.
7. Włóż kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.
8. Naciśnij włącznik, aby pompa zaczęła działać.
9. Przed ułożeniem pacjenta na materacu odczekaj, aż materac zostanie całkowicie napompowany.

10. Ustaw ciśnienie na odpowiednim poziomie.

Środki bezpieczeństwa

- Uważaj podczas obsługi sprzętu elektrycznego.
- Nie pozostawiaj produktu podłączonego do prądu elektrycznego, gdy nie jest używany.
- Nie wolno wystawiać sprzętu elektrycznego na działanie nadmiernej wilgoci.
- Nie używaj żrących środków czyszczących, takich jak przemysłowe odtłuszczacze lub rozpuszczalniki octowe
- Nie próbuj przenosić urządzenia, gdy jest ono podłączone do zasilania elektrycznego.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Czyszczenie / Dezynfekcja

Pompa:

Uwaga!

Odłącz od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia. Używaj ściereczki nasączonej łagodnym roztworem detergentu. Przestrzegaj stężeń roztworów rekomendowanych przez producentów. Przestrzegaj zaleceń producenta przed użyciem roztworu czyszczącego.

Używać szmatki nasączonej roztworem środka myjącego lub detergentu dezynfekującego z oznaczeniem CE zgodnie ze stężeniami zalecanymi przez producenta i czasem trwałości.

Konserwacja

Czynności konserwacyjne pompy muszą być wykonane wyłącznie przez technika upoważnionego i przeszkolonego przez importera.