

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
TAŚMA DO KINESIOTAPINGU PILOTAPE SILK
PILO-9010
„WYRÓB MEDYCZNY”**



UWAGA! Przed przystąpieniem do pierwszego użycia wyrobu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Przy zakupie należy sprawdzić kompletność oraz stan jakościowy wyrobu. Ewentualne zastrzeżenia zgłosić osobie wydającej. Zgłaszając zastrzeżenia ilościowe/jakościowe, należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej tj. przedstawić dowód zakupu oraz wypełnioną przez punkt detaliczny kartę gwarancyjną.

I. OPIS WYROBU

Bawełniano-jedwabna taśma do kinesiotapingu, pokryta hipoalergiczną, akrylową powłoką klejącą. Grubość i rozciągliwość taśmy zbliżone są do elastyczności skóry, co ułatwia wykonywanie pełnego zakresu ruchów. Ich zadaniem jest łagodzenie bólu, zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz wspomaganie pracy układu krążenia w procesie leczenia i rehabilitacji.
Rozmiar: 5cm x 5m

II. WŁAŚCIWOŚCI

- Bawełniano-jedwabny, oddychający materiał
- Wodoodporny
- Doskonała przyczepność
- Falisty wzór kleju zwiększający lecznicze działanie taśmy
- Nie zawiera lateksu

III. SPOSÓB UŻYCIA

- Aplikuj taśmę minimum 30 minut przed aktywnością fizyczną
- unikaj rozciągania końcówek taśmy
- Oczyszć oraz wysusz skórę przed aplikacją
- Po naklejeniu, przetrzyj taśmę by aktywować klej i zwiększyć jego przyczepność
- Dla lepszej przyczepności, usuń nadmiar owłosienia z miejsca w którym będzie aplikowana taśma
- Nie zrywaj taśmy, a delikatnie ją zroluj w kierunku wzrostu włosów
- Jeśli krawędzie się odklejają, możesz je przyciąć

IV. SKŁAD

96% Wiskoza, 4% Elastan

VI. ZASADY UŻYTKOWANIA

- Ten produkt może być używany tylko zgodnie z zaleceniem lekarza,
- Produkt i jego elementy należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem,
- Skóra w miejscu użycia powinna być czysta – nie należy na czas noszenia wyrobu stosować okładów leczniczych z maści i kremów, nie nakładać okładów tuż przed założeniem,

- Produkt powinien być aplikowany przez wykwalifikowany personel medyczny,
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

VII. ZASTOSOWANIE

Produkt może być używany w przypadku:

- Obrzęków
- Chorób zwyrodnieniowych
- Urazów stawów
- Niestabilności stawów
- Dysfunkcji układu krążenia oraz układu limfatycznego

VIII. PRZECIWSKAZANIA

- przerwanie ciągłości skóry w miejscu aplikacji plastra (np. rany, infekcje, różnego rodzaju odczyny zapalne);
- tętniaki;
- złośliwe formy nowotworów (jednak w tym przypadku o oklejeniu i metodyce decyduje lekarz prowadzący);
- niezrośnięte złamania;
- ostra faza reumatyzmu;
- zakrzepica żył głębokich;
- niewydolność krążenia w stadium III lub IV według NYHA;
- cukrzyca;
- łuszczyca (tylko w miejscu zajęтым chorobowo);
- żylaki;
- świeże blizny pooperacyjne.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Wytwórca
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Wyrób medyczny



REHA FUND Sp. z o.o.
 ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
 tel.: +48 669 222 213; +48 605 499 599
 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Wer. 1.1
 Wydano:



KARTA GWARANCYJNA
TAŚMA DO KINESIOTAPINGU PILOTAPE SILK
PILO-9010

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Wyrób objęty jest 18 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że produkt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Wymiana zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi
7. Wymiany powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
9. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.