

KARTA GWARANCYJNA

KULA ŁOKCIOWA

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

- Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
- Kula jest objęta 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
- Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
- Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkownika.
- Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
- Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją poduszki opisane w instrukcji używania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. deformacja, rozdarcie;
 - uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania wyrobu niezgodnie z instrukcją używania, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
- Przed oddaniem produktu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją używania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
- Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy REHA FUND Sp. z o.o.
- W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
- Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA

KULA ŁOKCIOWA

Nr kat.: RF – 200
Max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
Regulacja wysokości: 66 cm – 91,5 cm
Waga: 0,53 kg
Wysokość od uchwytu do obejm: 22 cm



Przed rozpoczęciem korzystania z kuli, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Kule łokciowe przeznaczone są do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia, do podpierania się, utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych przy zakazie pełnego obciążenia kończyny. Przeznaczone dla pacjentów po kontuzjach, wypadkach, złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, seniorów.

PRZECIWWSKAZANIA:

Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na kuli.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- Podczas korzystania z kuli zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie kuli w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Aby wyregulować kulę na pożądaną wysokość należy:

- wcisnąć przycisk zwalniający na dole kuli i lekko przekręcić dolną rurkę;
- ustawić pożądaną wysokość;
- obrócić dolną rurkę tak, aby przycisk zablokował się w otworach;

Należy dokładnie sprawdzić czy przycisk jest zablokowany w otworach.



Poniższe zalecenia to zalecenia Producenta. Przed użyciem skonsultować celowość zastosowań, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Wysokość kuli powinna być tak dopasowana do użytkownika, aby mógł on zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętą nogą w stawie kolanowym. Rękojeść powinna być wyregulowana tak, aby ręka pozostawała lekko zgięta w stawie łokciowym a właściwy ciężar ciała opierał się na rękach a nie na dołach pachowych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Części z tworzywa i pianki należy czyścić tylko ciepłą wodą z dodatkiem mydła.
- Części metalowe należy czyścić suchą szmatką.



Do czyszczenia kuli nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.




Zaleca się regularną kontrolę kuli, aby upewnić się czy:

- 1. nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
- 2. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
- 3. otwory w rurce nie są powiększone lub wydłużone;
- 4. nie ma luzów na rękojeści i wsporniku pachowym;
- 5. dolna nasadka nie uległa zużyciu – jeżeli tak, należy ją wymienić.

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności kuli do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.

NOTATKI

ELEMENTY KULI

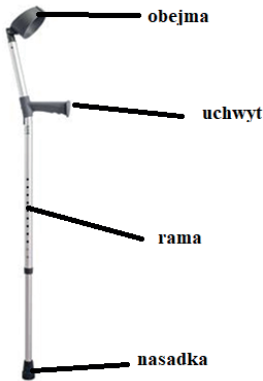

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Nasadka	guma bez lateksu + żelazo
Obejma	PP (polipropylen)
Uchwyt	PA (poliamid)

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent		Kod partii
	Oznakowanie CE		Ilość
	Numer katalogowy		Ostrzeżenie
	Numer modelu		Chronić przed wilgocią
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Wyrób medyczny		