

INSTRUKCJA UŻYWANIA CHODZIKA CZTEROKOŁOWEGO RF-610

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim.

Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu.



UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETRY TECHNICZNE


Nr katalogowy:	RF-610
Max. bezpieczne obciążenie:	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów:	79-92,5 cm
Szerokość po rozłożeniu:	61,5 cm
Szerokość po złożeniu:	27,5 cm
Całkowita długość:	64 cm
Średnica koła:	20 cm
Waga:	7,8 kg

ELEMENTY CHODZIKA I MONTAŻ

Elementy chodzika są przedstawione na rys. nr 1.

Montaż chodzika:

1. Wyciągnij z kartonu wszystkie części: oparcie, uchwyt z rurką, ramę chodzika.
2. Otwórz ramę chodzika. Przyłóż do ramy oparcie i sprawdź, czy otwory do montowania na ramie i oparciu są widoczne. Wkręć śruby montujące.
3. Włóż do ramy uchwyt z rurką i ustaw odpowiednią wysokość rączek. Wkręć motylki mocujące.

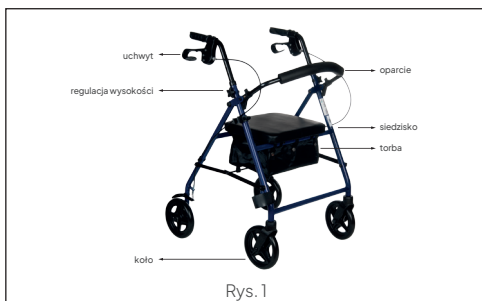

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA

Aby rozłożyć:

1. Pociągnij w dół siedzisko do momentu aż rama całkowicie się rozłoży i poczujesz opór.

Aby złożyć:

2. Podnieś siedzisko.
3. Złóż ramę ciągnąc siedzisko do góry.

HAMULCE

1. Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez docisnięcie uchwytu hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się niezależnie.
2. Każdy z hamulców można zablokować - aby to uczynić, należy pchnąć uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry.

Rama	stal
Koła	PVC (polichlorek winylu)
Uchwyty	PVC (polichlorek winylu)
Torba	poliester
Widelec koła	PA (poliamid)
Hamulec	PA (poliamid) +20%GF (włókno szklane)



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z chodzika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE WYROBU

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. Umożliwia samodzielną realizację większości codziennych czynności ruchowych. Może być używany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

IV. PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na chodziku, urazy kończyn dolnych uniemożliwiające utrzymanie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z błędnikiem, niestabilność kręgosłupa.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem chodzika upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika.
3. Nie przewozić w koszyku elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika.
4. Podczas korzystania z chodzika zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie chodzika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów, co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika.
7. Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach oraz schodach ruchomych.
8. Nie przechowywać chodzika w temperaturze poniżej 0°C. Nie wystawiać chodzika na długi czas w temperaturze powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować przegrzanie elementów chodzika i poparzenie użytkownika.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwnych.
10. Nie wieszać toreb ani worków na uchwytach - niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Użyć hamulca głównego na stromych powierzchniach.
12. Nigdy nie używać chodzika do poruszania się, gdy jest złożony!
13. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, chodzik może przechylić się do tyłu.
14. Używanie chodzika do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne.
15. Stosować na twardych powierzchniach.
16. Nie stosować jako zamiennik wózka inwalidzkiego.
17. Nie używać na pochyłym terenie.
18. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwwskazań do używania wyrobu.



UWAGA! Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgłębionymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmie chodzik.



UWAGA! Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane. Upewnij się, że hamulce są zablokowane, gdy użytkownik siedzi na siedzisku. Na działanie hamulców może wpłynąć ścieranie kół.

VI. SPOSÓB UŻYWANIA

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

- 1. Wysokość rączek można dostosować do użytkownika.
- 2. Wykręć motylki mocujące z ramy po prawej i lewej stronie.
- 3. Pociągnij rurkę w górę lub w dół do momentu osiągnięcia pożądaney wysokości.
- 4. Przykręć motylki mocujące.

REGULACJA

- 1. Maksymalne obciążenie torby to 5 kg.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- 1. Zaleca się regularną kontrolę chodzika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - śruby są prawidłowo dokręcone;
 - przyciski blokujące prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek;
 - przewody hamulców nie są postrzępione;
 - hamulce są prawidłowo wyregulowane;
 - żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.



UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części. W razie potrzeby należy nasmarować części mechaniczne.



UWAGA! Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych. Urządzenie można dezynfekować alkoholem lub pochodnymi, ale o niskim stężeniu.

KOLOR

Chodzik jest dostępny w kolorze niebieskim, czerwonym, czarnym i szarym.

VIII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli chodzika zgodnie z zaleceniami producenta. Patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja – należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

IX. PRZEWIDZANY OKRES UŻYWANIA

Przewidzany okres używania chodzika to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrob.

X. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XI. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
	Oznakowanie CE		Kod partii
	Numer katalogowy		Ilość
	Numer modelu		Góra, nie przewracać
	Data produkcji		Chronić przed wilgocią
	Zajrzyj do instrukcji używania		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Wyrób medyczny		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska
www.rehafund.pl



I/RF-610/2/16.10.2024
Data wydania instrukcji używania: 10.2024 v.2

